

 CHEMI-PHARM®

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

MAPOmedical

PRODUKTOVÝ KATALOG



For a healthier world





Chemi-Pharm vyvíjí, vyrábí a prodává uživatelsky přívětivé dezinfekční a čisticí prostředky a přípravky pro péči o pokožku pro profesionální použití ve zdravotnictví.

Chemi-Pharm byl založen v roce 1997 se sídlem a výrobou v Estonsku. Společnost působí po více než 20 let v oblasti hygieny a prevence infekcí.

Dnes Chemi-Pharm dodává produkty pro kontrolu infekce v 90 % všech nemocnic a zdravotnických zařízení v Estonsku. I když jsme hrdí na silné zastoupení na našem domácím trhu, jsme stejně ambiciózní z hlediska mezinárodního růstu.

Chemi-Narm je lídrem na trhu v pobaltských státech regionu a je zastoupena ve 27 zemích po celém světě. Export v současné době tvoří více než 70 % celého objemu výroby a nadále roste.

V průběhu let vyvinuli kompletní řadu speciálních dezinfekčních prostředků pro zdravotnická zařízení. Sortiment zahrnuje více než sto produktů, které jsou rozděleny do následujících skupin: dezinfekční prostředky pro ruce a pokožku, dezinfekční prostředky na nástroje,

dezinfekční prostředky na povrchy, výrobky pro péči o pokožku, prostředky pro čištění a údržbu.

Kromě zdravotnického průmyslu se produkty používají také v jiných odvětvích, kde jsou stejně vysoké požadavky a očekávání ohledně hygieny. Mezi klienty patří výrobci potravin, úklidové společnosti, školky a školy.

Chemi-Pharm velice dbá na uživatelskou přívětivost a bezpečnost životního prostředí. Záleží nám na čistotě, zdraví a životním prostředí každého člověka. Proto vyrábíme pouze produkty, které používáme sami a doporučujeme našim nejbližším a nejdražším.

Veškeré produkty Chemi-Pharmu splňují vysoké standardy velmi náročného zdravotnického sektoru a provozní a výrobní procesy společnosti jsou v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO 13485.

Naši klienti mají velká očekávání na kvalitu výrobků, proto se zaměřujeme na jejich potřeby a věnujeme pozornost každému malému detailu k dosažení nejlepších výsledků.

Chemi-Pharm AS
Address: Tännassilma tee 11, Tännassilma küla
Saku vald, Harju maakond 76406, Estonia

Tel: +372 6778806
E-mail: chemi-pharm@chemi-pharm.com
www.chemi-pharm.com



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

Společnost MAPO medical byla založena v roce 2007, od roku 2014 je součástí skupiny MAPO Group, jež je významným poskytovatelem služeb v oblasti zdravotnictví a ryze českou společností se silným finančním zázemím.

Jsme dynamicky rostoucí společnost, která je předním dodavatelem komplexního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky.

Našimi klienty jsou nejen velká zdravotnická zařízení jako nemocnice, polikliniky, lékařské domy, lázeňské celky,

ale i specializovaná lékařská centra, domovy pro seniory, lékárny, ambulance a soukromé společnosti.

Disponujeme moderním logistickým centrem v Praze a Brně, včetně vlastních vozů.

Náš profesionální obchodní tým je vždy k dispozici zákazníkům v rámci celorepublikové působnosti.

Zaručujeme krátké dodací lhůty, kvalitní produkty, komplexní a kontinuální zásobování.

MAPO medical s.r.o.
Vlastimila Pecha 2, hala C
627 00 Brno
oddělení dezinfekce Brno
T: +420 606 075 522, +420 722 984 308
E: dezinfekce@mapomedical.cz

MAPO medical s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
Lighthouse Waterfront Towers 170 00 Praha 7
oddělení dezinfekce Praha
T: +420 722 984 049
E: dezinfekceffimapomedical.cz

5 NÁVOD NA HYGIENU RUKOU

6 MYTÍ RUKOU A POKOŽKY

7 CP WASH LOTION / TEKUTÉ MÝDLO

8 MEDICAL SOAP SENSITIVE / TEKUTÉ MÝDLO PRO CITLIVOU POKOŽKU

9 MYTÍ RUKOU A POKOŽKY S DEZINFEKČNÍM ÚČINKEM

10 DESO SCRUB CHG 4 % / TEKUTÉ MÝDLO S DEZINFEKČNÍM ÚČINKEM

11 DEZINFEKCE NA RUCE

12 CHEMISEPT GEL / ALKOHOLOVÝ DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE

13 CHEMISEPT MED / ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE NA RUCE

14 CHEMISEPT VIR+ / ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE NA RUCE

15 DEZINFEKCE POKOŽKY

16 CHEMISEPT HF / ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE NA POKOŽKU S CHLORHEXIDINEM

17 CHEMISEPT FG / DEZINFEKČNÍ SPREJ NA NOHY A OBUV

18 PÉČE O POKOŽKU

19 BIO CARE / KRÉM NA RUCE PRO CITLIVOU A SUCHOU POKOŽKU

20 DEZINFEKCE NÁSTROJŮ A POMŮCEK

21 STERISEPT INSTRU / TEKUTÝ PŘÍPRAVEK K DEZINFEKCI NÁSTROJŮ A POMŮCEK

22 CHEMIDES PULVER / PRÁŠKOVÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO NÁSTROJE, ENDOSKOPY A POMŮCKY

23 DEZINFEKCE PLOCH A POVRCHŮ

24 BACTICID AF / ALKOHOLOVÝ PŘÍPRAVEK K DEZINFEKCI PLOCH A POVRCHŮ VE SPREJI

25 BACTICID AF WIPES/ ALKOHOLOVÉ UBROUSKY K DEZINFEKCI PLOCH A POVRCHŮ

26 STERISEPT READY TO USE / BEZALKOHOLOVÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA PLOCHY A POVRCHY

27 STERISEPT WIPES / BEZALKOHOLOVÉ UBROUSKY K DEZINFEKCI PLOCH A POVRCHŮ

28 CP DRY WIPES DISPENSER SYSTEM / ZÁSOBNÍK S JEDNORÁZOVÝMI UBROUSKY K DEZINFEKCI PLOCH A POVRCHŮ

29 STERISEPT PLUS / TEKUTÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA PLOCHY A POVRCHY

30 CHLORINEX 60 / TABLETY NA BÁZI CHLÓRU K DEZINFEKCI PLOCH, POVRCHŮ A ODPADŮ

31 ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA PLOCHY A POVRCHY

32 CHEMIPHARM DES NEW / ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PLOCHY A POVRCHY S DEZINFEKČNÍM ÚČINKEM

32 CLEAN FEEL / UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PLOCHY A POVRCHY

33 NEUTRAL CLEANER / UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK S VYNIKAJÍCÍ MATERIÁLOVOU KOMPATIBILITOU NA PLOCHY A POVRCHY

33 BOZO / UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO SANITÁRNÍ POVRCHY

34 DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ A POMŮCKY

35 DÁVKOVAČ NA STĚNU S LIŠTOU S PÁKOU NEBO BEZ PÁKY

35 DÁVKOVAČ NA POSTEL

36 DÁVKOVAČE NA STĚNU PRO LAHVE TYPU AIRLESS LAHVE

36 DÁVKOVAČE NA STĚNU S LIŠTOU, S PÁKOU NEBO BEZ PÁKY

38 NORMY

NÁVOD NA HYGIENU RUKOU



1 Třete si dlaně o sebe.
Nezapomeňte na zápěstí.



2 Pravá dlaň přes levý hřbet
s propletenými prsty
a naopak.



3 Dlaně proti sobě
s propletenými prsty.



4 Sevržit hřbetní strany prstů
do opačné dlaně.



5 Otáčením mnout pravý
palec v sevření levé dlaně
a naopak.



6 Otáčením mnout sevřené
špičky prstů pravé ruky
v dlani levé ruky a naopak.



MYTÍ RUKOU - Naneste mycí prostředek na mokré ruce. Vtírejte do pokožky rukou podle techniky hygieny rukou (pokyny výše). Opláchněte a osušte si ruce. Zavřete vodovodní baterii pomocí papírové utěrky nebo loktu.



DEZINFEKCE RUKOU - Aplikujte dezinfekční prostředek na suché a čisté ruce. Vtírejte do pokožky rukou podle techniky hygieny rukou (pokyny výše). Ujistěte se, že máte ruce důkladně zvlhčené dezinfekčním prostředkem. Vtírejte po dobu 30 sekund, dokud nejsou ruce suché.



MYTÍ RUKOU A POKOŽKY

CP WASH LOTION

Tekuté mýdlo na mytí pokožky

CP WASH LOTION je jemné tekuté mýdlo šetrné k pokožce, pro časté mytí rukou, těla a vlasů. Odstraňuje nečistoty a je vhodné pro normální, suchou a podrážděnou pokožku. Obsahuje složky olivového oleje pro zvláčnění pokožky. Je vhodné pro citlivou pokožku.

Je dermatologicky testováno, bez barviv, mýdla a bez parfemace, vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory, v potravinářství i v průmyslu.

OBLAST POUŽITÍ:

- pro mytí rukou před hygienickou a chirurgickou dezinfekcí rukou
- k mytí a koupání pacientů včetně vlasů
- k předoperačnímu mytí pacienta
- pH 5,5

POUŽITÍ: Naneste přípravek v dostatečném množství na mokré ruce nebo mokrou pokožku při koupání na celé tělo včetně vlasů. Napěňte je vodou, umyjte, dobře opláchněte a poté důkladně osušte. U mytí rukou věnujte zvláštní pozornost konečkům prstů, oblasti mezi prsty, zápěstí a dlaním. Před použitím dezinfekčního prostředku na ruce se ujistěte, že máte zcela suché ruce.

SLOŽENÍ:


Voda, Laurethsulfát sodný, Kokamidopropyl betain, PEG-7 Glyceryl cocoate, Glycerin, Chlorid sodný, Benzoát sodný, Kyselina citronová.

TYP PŘÍPRAVKU:

Kosmetika

BALENÍ:

Kód	Balení
001.	500 ml láhev s uzávěrem
002.	500 ml láhev s pumpou
003	1 l láhev s uzávěrem
004	1 l láhev s pumpou
005	1 l láhev airless
006	5 l kanýstr

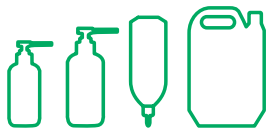

500 ml / 1000 ml /
1000 ml airless / 5000 ml



MEDICAL SOAP SENSITIVE

Tekuté mýdlo pro citlivou pokožku k jemnému mytí

MEDICAL SOAP SENSITIVE je jemné tekuté mýdlo velmi šetrné k citlivé pokožce, pro časté mytí rukou, těla a vlasů. Jemně odstraňuje nečistoty a je vhodné pro mytí citlivé a velice suché nebo podrážděné pokožky. Bez obsahu mýdla se zvláčňujícími složkami a nepění.

Je dermatologicky testováno, bez barviv, mýdla a bez parfemace, vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory.

OBLAST POUŽITÍ:

- pro mytí rukou před hygienickou a chirurgickou dezinfekcí rukou
- k mytí a koupání pacientů včetně vlasů
- k předoperačnímu mytí pacienta
- pH 5,5
-

POUŽITÍ:

Naneste přípravek v dostatečném množství na mokré ruce nebo mokrou pokožku při koupání na celé tělo včetně vlasů. Napěňte je vodou, umyjte, dobře opláchněte a poté důkladně osušte. U mytí rukou věnujte zvláštní pozornost konečkům prstů, oblasti mezi prsty, zápěstí a dlaním. Před použitím dezinfekčního prostředku na ruce se ujistěte, že máte zcela suché ruce.

SLOŽENÍ:

Akvamarínový Laureth síran sodný, Cocamidopropyl Betain, Cocoamide DEA, glycerin benzoan sodný Chlorid sodný, kyselina citrónová

TYP PŘÍPRAVKU:

Kosmetika

BALENÍ:

Kód	Balení
007	500 ml láhev s uzávěrem
008	500 ml láhev s pumpou
009	1 l láhev s uzávěrem
010	1 l láhev s pumpou
011	1 l láhev airless
012	5 l kanýstr





MYTÍ RUKOU A POKOŽKY
S DEZINFEKČNÍM ÚČINKEM

DESO SCRUB CHG 4%

Mycí emulze s dezinfekčním účinkem

DESO SCRUB je mycí emulze na hygienické mytí rukou a dekolonizaci celého těla včetně vlasů s dezinfekčním účinkem. Používá se ve zdravotnických zařízeních a provozech se zvýšenými hygienickými nároky na hygienu rukou a dekolonizaci celého těla včetně vlasů. (potravinářství, veterinární sféra, komunální hygiena).

OBLAST POUŽITÍ:

- pro mytí rukou
- k dekolonizaci celého těla včetně vlasů
- k předoperačnímu mytí pacienta

POUŽITÍ:

Hygienické mytí rukou: Navlhčete ruce a zápěstí, naneste 5 ml přípravku a umývejte doporučeným postupem pro hygienické mytí rukou. Poté opláchněte vodou a osušte.

Dekolonizace těla (ESBL, MRSA): Naneste přípravek na dostatečně navlhčenou mycí žínku, pečlivě rozetřete a omyjte celé tělo včetně vlasů, po té opláchněte vodou.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívat na podrážděnou nebo poškozenou pokožku. Nepoužívat při alergii na látky obsažené v produktu. V případě podráždění omyjte pečlivě vodou. Zabraňte vniknutí přípravku do očí. Při přetrvávajících potížích kontaktujte lékaře.

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Chlorhexidin diglukonát 4 g.

ÚČINNOST:

baktericidní (včetně MRSA), levurocidní (*C. albicans*)

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:


Účinnost	Norma	Koncentrace	Expozice
Baktericidní	EN 13727+A2	100 %	60 s
	EN 1499	100 %	60 s
	EN 12791	100 %	3 min
Levurocidní (<i>C. albicans</i>)	EN 1650+A1	100 %	60 s

TYP PŘÍPRAVKU:

Biocid

BALENÍ:

Kód	Balení
046	500 ml láhev s pumpou
047	1 l láhev s pumpou
048	5 l kanystr

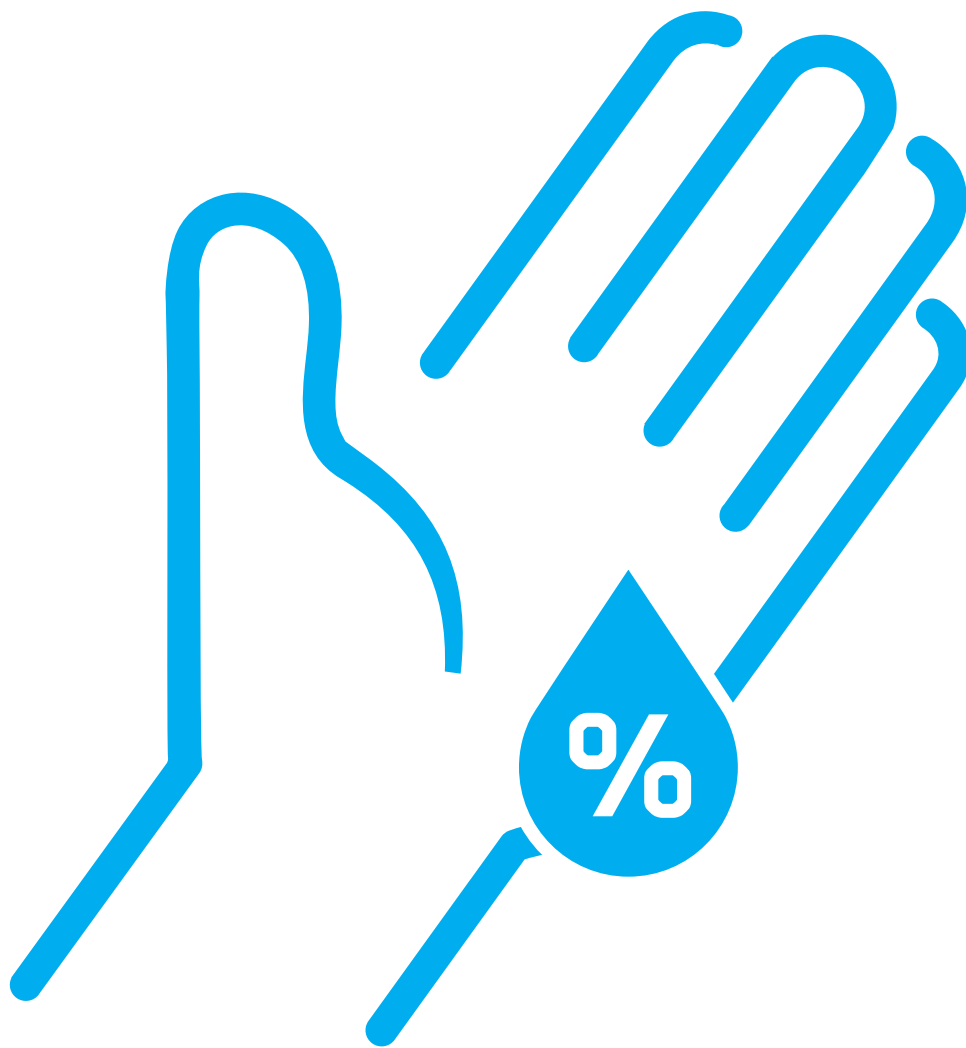

DEZINFEKCE NA RUCE

CHEMISEPT GEL

Gelový alkoholový dezinfekční přípravek na ruce

CHEMISEPT GEL je gelový alkoholový dezinfekční přípravek na ruce pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Dermatologicky testován, bez barviv a parfermace. Uživatelsky příjemná gelová forma (při aplikaci nekape).

OBLAST POUŽITÍ:

- pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou
- ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, v laboratořích, ve farmacii, v institucích, potravinářství, v komunální sféře
- rychlá a dlouhotrvající účinnost
- široké spektrum účinku včetně plného spektra virů

POUŽITÍ:

Aplikujte neředěný na čisté a suché ruce. Vtírejte do rukou tak, aby byla všechna místa na ruce dostatečně mokrá po stanovenou dobu expozice.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní



MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ
Hygienická dezinfekce rukou	EN1500	30 s
Chirurgická dezinfekce rukou	EN12791	90 s
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727	15 s
Levurocidní	EN13624	15 s
Mykobaktericidní	EN14348	30 s
Obalené viry	EN14476	30 s
Norovirus	EN14476	30 s
Rotavirus	EN14476	30 s
Adenovirus	EN14476	30 s
Poliovirus	EN14476	60 s
Plně virucidní	EN14476	60 s

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Ethanol 72,5 g; Isopropanol 7,5 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Biocid

BALENÍ:

Kód	Balení
031	100 ml lahvička s uzávěrem
032	500 ml láhev s uzávěrem
033	500 ml láhev s pumpou
034	1 l láhev s uzávěrem
035	1 l láhev s pumpou
036	1 l láhev airless
037	5 l kanystr



100 ml / 500 ml / 1000 ml
1000 ml airless / 5000 ml

CHEMISEPT MED

Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na ruce

CHEMISEPT MED je tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na ruce pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Dermatologicky testován, bez barviv a parfermace.

OBLAST POUŽITÍ:

- pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou
- ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, v laboratořích, ve farmacii, v institucích, potravinářství, v komunální sféře
- rychlá a dlouhotrvající účinnost
- široké spektrum účinku včetně plného spektra virů

POUŽITÍ:

Aplikujte neředěný na čisté a suché ruce. Vtírejte do rukou tak, aby byla všechna místa na rukou dostatečně mokrá po stanovenou dobu expozice.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní



MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ
Hygienická dezinfekce rukou	EN1500	30 s
Chirurgická dezinfekce rukou	EN12791	90 s
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727	15 s
Levurocidní	EN13624	15 s
Mykobaktericidní	EN14348	20 s
Obalené viry	EN14476	30 s
Norovirus	EN14476	15 s
Rotavirus	EN14476	15 s
Adenovirus	EN14476	30 s
Poliovirus	EN14476	60 s
Plně virucidní	EN14476	60 s

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Ethanol 72,5 g; Isopropanol 7,5 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Biocid

BALENÍ:

Kód	Balení
023	100 ml lahvička s uzávěrem
025	500 ml láhev s uzávěrem
026	500 ml láhev s pumpou
027	1 l láhev s uzávěrem
028	1 l láhev s pumpou
029	1 l láhev airless
030	5 l kanystř



100 ml / 500 ml / 1000 ml
1000 ml airless / 5000 ml

CHEMISEPT VIR+

Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na ruce

CHEMISEPT VIR+ je rychlý a tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na ruce pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Dermatologicky testován, bez barviv a parfemace. Pro situace s vyššími hygienickými požadavky.

OBLAST POUŽITÍ:

- pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou
- ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, v laboratořích, ve farmacii, v institucích, potravinářství, v komunální sféře
- rychlá a dlouhotrvající účinnost
- široké spektrum účinku včetně plného spektra virů

POUŽITÍ:

Aplikujte neředěný na čisté a suché ruce. Vtírejte do rukou tak, aby byla všechna místa na ruce dostatečně mokrá po stanovenou dobu expozice.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní



MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ
Hygienická dezinfekce rukou	EN1500	20 s
Chirurgická dezinfekce rukou	EN12791	90 s
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727	15 s
Levurocidní	EN13624	15 s
Fungicidní	EN13624	30 s
Mykobaktericidní	EN14348	15 s
Obalené viry	EN14476	15 s
Norovirus	EN14476	15 s
Rotavirus	EN14476	15 s
Adenovirus	EN14476	30 s
Poliovirus	EN14476	30 s
Plně virucidní	EN14476	30 s

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Ethanol 85 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Biocid

BALENÍ:

Kód	Balení
038	100 ml lahvička s uzávěrem
040	500 ml láhev s uzávěrem
041	500 ml láhev s pumpou
042	1 l láhev s uzávěrem
043	1 l láhev s pumpou
044	1 l láhev airless
045	5 l kanystř



100 ml / 500 ml / 1000 ml
1000 ml airless / 5000 ml



DEZINFEKCE POKOŽKY

CHEMISEPT HF

**Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek
na bázi kombinace alkoholu a chlorhexidinu**

CHEMISEPT HF je bezbarvá dezinfekce na bázi alkoholů a 2 % chlorhexidinem na dezinfekci pokožky a chirurgické zákroky.

OBLAST POUŽITÍ:

- je vhodný k dezinfekci kůže před porušením integrity, injekcemi, odběry krve, biopsií, zaváděním kanyl, před odstraněním stehů atp.
- obsahuje chlorhexidin, který má dlouhodobé účinky po dobu až 24 hodin
- díky bezbarvému složení je také vhodný pro použití v kosmetice

POUŽITÍ:

Použijte neředěný. Aplikujte na suchou pokožku pomocí postřiku, nebo tamponem smočeným v přípravku. Před zákrokem dodržte expoziční čas nebo nechte důkladně přípravek na kůži zaschnout. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Neaplikujte v blízkosti očí a sliznic, do ran a na poškozenou kůži.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ
Před aplikací injekcí a odběrem krve		30 s
Před zavedením kanyl, punkcemi kloubů a chirurgickými zákroky		60 s
Předoperační dezinfekce pokožky		90 s
Před použitím na pokožku s vysokou hustotou mazových žláz		180 s
Chirurgická dezinfekce rukou	EN12791	90 s
Hygienická dezinfekce rukou	EN1500	30 s
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727	30 s
Levurocidní	EN13624	30 s
Mykobaktericidní	EN14348	30 s
Obalené viry	EN14476	30 s
Rotavirus	EN14476	60 s
Adenovirus	EN14476	60 s

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Ethanol 70 g, Chlorhexidin diglukonát 2 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Biocid

BALENÍ:

Kód	Balení
060	100 ml lahvička ve spreji
061	250 ml láhev ve spreji
062	500 ml láhev s aplikačním uzávěrem
063	1 l láhev s uzávěrem
064	5 l kanystr



100ml / 250 ml / 500 ml /
1000 ml / 5000 ml



CHEMISEPT FG

Alkoholový bezbarvý sprej na nohy a obuv s dezinfekčním účinkem

CHEMISEPT FG je tekutý alkoholový přípravek, určený k dezinfekci nohou a obuvi. Funguje jako profylaktické opatření k prevenci plísňových infekcí. Snižuje pocení nohou a tím předchází vzniku nepříjemných pachů. Výrobek osvěžuje a regeneruje nohy. Lze také použít k dezinfekci obuvi odolné vůči alkoholu.

OBLAST POUŽITÍ:

- ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče
- rychlá a dlouhotrvající účinnost s mátovou parfemací

POUŽITÍ:

Dezinfekce pokožky nohou: Aplikujte postříkem na předem očištěnou a suchou pokožku v dostatečném množství, nechte působit, neotírejte ani neoplachujte.

DEZINFEKCE OBUVI:

Aplikujte postříkem do všech míst v obuvi a nechte působit.

ÚČINNOST:

baktericidní, levurocidní

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Ethanol 62 g; Alkyl (C12-18) dimethylbenzylamonium chlorid 0,125 g; Alkyl (C12-C14) ethylbenzylamonium chlorid 0,125 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Kosmetika

BALENÍ:

Kód	Balení
065	100 ml lahvička ve spreji
066	250 ml láhev ve spreji
067	1 l láhev s pumpou



100 ml / 250 ml / 1000 ml



PÉČE O POKOŽKU

BIO CARE

Krémová emulze pro citlivou a suchou pokožku

BIO CARE je zvláčňující a výživný krém na ruce a pokožku s kyselinou hyaluronovou (dlouhodobě zvláčňuje a zanechává pokožku jemnou a vláčnou).

OBLAST POUŽITÍ:

- je speciálně vyvinutý pro citlivou a suchou pokožku

SLOŽENÍ:

Voda, Glycerin, Cetearylalkohol, Isopropylmyristát, olej ze semen Vitis vinifera, Glycerol stearátcitrát, Triglycerid kaprylový / kaprinový, hydroxyethyl urea, olej Prunus Amygdalus Dulcis, olej ze semen Helianthus annuus, olej ze semen Simmondsia chinensis, olej ze semen Citrus aurantium bergamia, Palmitát, Retinyl palmitát, Glyceryl kaprylát, Fenoxylethanol, Decylene glycol, Caprylyl glycol, Polyakrylát sodný, Hydrogenovaný polydecen, Trideceth-6.

TYP PŘÍPRAVKU:

Kosmetika


BALENÍ:

Kód	Balení
069	50 ml lahvička s uzávěrem
070	200 ml v tubě
071	250 ml láhev s pumpou
072	500 ml láhev s pumpou



200 ml / 500 ml



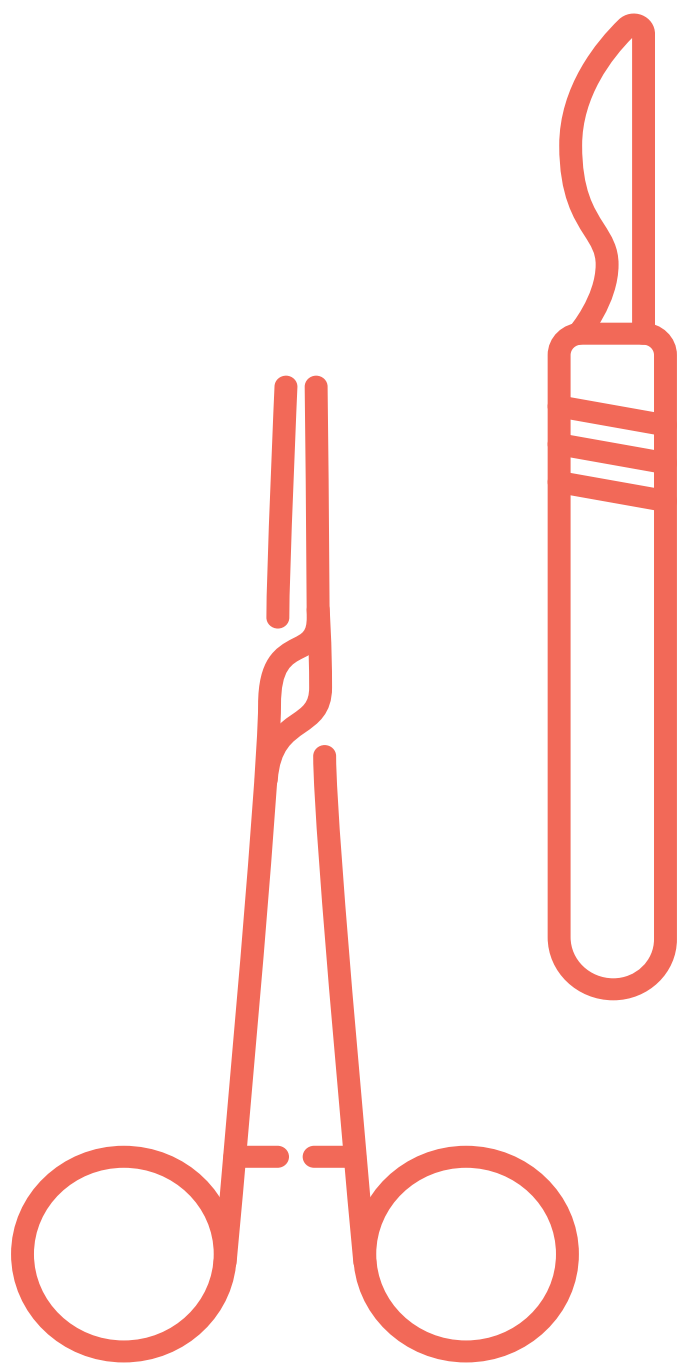

DEZINFEKCE NÁSTROJŮ A POMŮCEK

STERISEPT INSTRU

**Tekutý dezinfekční prostředek
na dezinfekci chirurgických nástrojů a pomůcek**

STERISEPT INSTRU je určen k dezinfekci a předčištění všech termostabilních a termolabilních nástrojů a pomůcek. Bez obsahu fenolů, aldehydů a fosfátů. S obsahem tenzidů, což je ideální pro manuální předčištění všech termostabilních a termolabilních nástrojů, endoskopů a pomůcek.

OBLAST POUŽITÍ:

- pro manuální dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek, a to i v ultrazvukových čističkách
- vhodný pro použití i v přítomnosti pacientů
- kompatibilita s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, porcelán a plastické hmoty
- ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, v laboratořích, ve farmacii, v institucích

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ / KONCENTRACE			
		5 MIN	15 MIN	30 MIN	60 MIN
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727	0,5%	0,25%		
Baktericidní	EN14561		0,5%	0,25%	
Levurocidní	EN13624	0,5%	0,25%		
Fungicidní	EN13624			1%	0,5%
Mykobaktericidní	EN14348		0,5%		
Mykobaktericidní	EN14563			0,5%	
Obalené viry	EN14476	0,5%	0,25%		
Rotavirus	EN14476		0,75%		
Norovirus	EN14476		1%		

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Didecylmethylammonium chlorid (DDAC), 15 g; N-(3-aminopropyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamin 15 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek třídy IIb

BALENÍ:

Kód	Balení
124	1 l dávkovací láhev
125	5 l kanystr



1000 ml / 5000 ml



CHEMIDES PULVER

Práškový dezinfekční přípravek určený
k dezinfekci nástrojů, endoskopů a pomůcek



CHEMIDES PULVER je práškový dezinfekční prostředek určený k manuální dezinfekci a čištění nástrojů a pomůcek bezprostředně po použití ponořením do předem připraveného pracovního roztoku. Vhodný je pro použití v UZV čističkách. Také vhodný pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů a pomůcek.

OBLAST POUŽITÍ:

- na nástroje a pomůcky z chirurgické oceli, skla, plastu, porcelánu, keramiky a plexiskla
- vhodný na povrchy a plochy zdravotnických prostředků otěrem
- anesteziologického příslušenství, dentálních otiskovacích hmot, tonometrů, dýchacích masek, inkubátorů
- je materiálově kompatibilní s běžnými materiály používanými ve zdravotnictví.
- nevhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku, pryže a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem.



POUŽITÍ:

Na přípravu 1 litru pracovního roztoku přidejte 17,5 g prášku (jedna dávkovací lžice). Přidejte dalších 17,5 gramů na každý litr vody. Roztok důkladně promíchejte (2-3 min), dokud se většina prášku nerozpustí a vyčkejte 15 minut než se roztok aktivuje. Nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Poté se nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou. Plochy zdravotnických prostředků a pomůcek lze dezinfikovat a čistit také pomocí otěru. Silně znečištěné plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, sporicidní

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ / KONCENTRACE	
		5 MIN	15 MIN
Baktericidní	EN13727, EN14561	1,5%	
Levurocidní	EN13624, EN14562	1,5%	
Fungicidní	EN13624, EN14562		1,75%
Mykobaktericidní	EN14348, EN14563		1,75%
Obalené viry	EN14476	1,5%	
Norovirus	EN14476	0,5%	
Adenovirus	EN14476	0,5%	
Poliovirus	EN14476		1,75%
Sporicidní (Clostridium difficile)	EN13704		1,5%
Sporicidní (Bacillus subtilis)	EN13704		1,75%

SLOŽENÍ:


100 g přípravku Chemides Pulver obsahuje: Peruhličitan sodný 41 g, Tetraacetyethylendiamin (aktivátor) 25 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek třídy IIb

BALENÍ:

Kód	Balení
130	1 kg dóza
131	5 kg kbelík

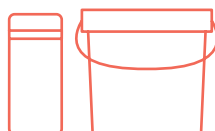

1 kg / 5 kg



DEZINFEKCE PLOCH A POVRCHŮ

BACTICID AF

Tekutý alkoholový přípravek určený k rychlé dezinfekci a čištění ploch a povrchů

BACTICID AF je rychlý dezinfekční prostředek na bázi ethanolu na plochy a povrchy odolné vůči alkoholu s rozprašovačem. Vhodný při vyšších hygienických požadavcích, kde je vyžadována rychlá expozice.

OBLAST POUŽITÍ:

- rychlá a účinná dezinfekce ve spreji na plochy a povrchy
- všechna zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, domovy pro seniory, farmaceutický a kosmetický průmysl, domácí péče
- vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
- vhodný pro rychlou dezinfekci povrchů v blízkosti pacienta

POUŽITÍ:

Aplikujte koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru (rozetřít utěrkou). Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku ve vzdálenosti nejméně 30 cm a nechte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).

DISPENSER SYSTEM pro pohodlnou a uživatelsky příjemnou aplikaci. Jednorázové utěrky v uzavřeném systému jsou použitelné po dobu 28 dnů.

ÚČINNOST:

baktericidní, levurocidní, mykobaktericidní, virucidní, fungicidní, tuberkulocidní



MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBENÍ
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	30 s
Levurocidní	EN13624, EN14562, EN13697	30 s
Mykobaktericidní	EN14348, EN14563	30 s
Obalené viry	EN14476	15 s
Norovirus	EN14476	15 s
Rotavirus	EN14476	15 s
Adenovirus	EN14476	30 s
Poliovirus	EN14476	120 s
Fungicidní (Aspergillus brasiliensis)	EN13624	2 min
Fungicidní (Aspergillus brasiliensis)	EN13697	3 min

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Ethanol 57 g, Isopropanol 6 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek třídy IIa

BALENÍ:

Kód	Balení
078	500 ml láhev ve spreji
079	1 l láhev ve spreji
080	5 l kanystř



500 ml / 1000 ml / 5000 ml

BACTICID AF WIPES

Dezinfekční alkoholové ubrousky určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem

BACTICID AF WIPES jednorázové ubrousky jsou určeny pro rychlou a snadnou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků, přístrojů a pomůcek odolných vůči vodě a působení alkoholu. Jsou bez aldehydů, barviv a parfemace. Mají plně virucidní účinek. Vhodný produkt s vyššími hygienickými požadavky, kde je důležitá rychlá expozice.

OBLAST POUŽITÍ:

- rychlá a účinná dezinfekce na plochy a povrchy
- všechna zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, domovy pro seniory, farmaceutický a kosmetický průmysl, domácí péče
- vhodný k dezinfekci pro rychlou dezinfekci povrchů v blízkosti pacienta

POUŽITÍ:

Ubrousky jsou připraveny k použití. Vytáhněte ubrousek z plastické dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Po odtržení ubrousku zavřete okamžitě kryt, aby nedošlo k vysušení ubrousků. Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte na pokyny výrobce. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).

ÚČINNOST:

baktericidní, levurocidní, mykobaktericidní, virucidní, fungicidní, tuberkulocidní

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	30 s
Levurocidní	EN13624, EN14562, EN13697	30 s
Mykobaktericidní	EN14348, EN14563	30 s
Obalené viry	EN14476	15 s
Norovirus	EN14476	15 s
Rotavirus	EN14476	15 s
Adenovirus	EN14476	30 s
Poliovirus	EN14476	120 s

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složky: Ethanol 57 g, Isopropanol 6 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek třídy IIa

BALENÍ:

Kód	Balení
084	100 ks dóza (16x20cm)
085	100 ks náhradní balení (16x20cm)
086	150 ks dóza (18x20cm)
087	100 ks náhradní balení (20x20cm)
088	200 ks dóza (20x20cm)



100 ks / 150 ks /
200 ks

STERISEPT READY TO USE

Dezinfekční prostředek bez obsahu alkoholu pro rychlou dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků

STERISEPT READY TO USE je rychlý dezinfekční prostředek bez obsahu alkoholu na plochy a povrchy citlivé na alkohol. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani PHMB. Materiálová kompatibilita s povrchy a pomůckami z nerezové oceli, skla, hliníku, mědi, mosazi, keramiky, PVC, gumy, plastů, silikonu, akrylu a plexiskla.

OBLAST POUŽITÍ:

- rychlá dezinfekce ve spreji bez obsahu alkoholu a šetrná k materiálům citlivých na alkohol
- všechna zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, domovy pro seniory, farmaceutický a kosmetický průmysl
- inkubátory, displeje, klávesnice a ovládací panely a vany
- vhodný na povrchy v okolí pacienta

POUŽITÍ:

aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku nebo pěny, případně otěru (rozetřít utěrkou). Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku ve vzdálenosti nejméně 30 cm a nechte jej působit po dobu expozice, přebytké množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Vhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akrylát, lesklé plasty).

DISPENSER SYSTEM pro pohodlnou a uživatelsky příjemnou aplikaci.

Jednorázové utěrky v uzavřeném systému jsou použitelné po dobu 28 dnů.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní (Clostridium diff.)

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	1 min
Levurocidní	EN13624, EN14562, EN13697	1 min
Mykobaktericidní	EN14348	5 min
Obalené viry	EN14476	0,5 min
Norovirus	EN14476	0,5 min
Rotavirus	EN14476	0,5 min
Fungicidní (Aspergillus brasiliensis)	EN13624	10 min
Sporicidní (Clostridium difficile)	EN13704	15 min

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Didecylmethylammonium chlorid (DDAC) 0,45 g; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin 0,45 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek třídy IIb

BALENÍ:

Kód	Balení
100	1 l láhev ve spreji /se zpěňovačem
101	5 l kanistr



1000 ml / 5000 ml

STERISEPT WIPES

Dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu na dezinfekci a čištění ploch a povrchů zdravotnických prostředků citlivých na alkohol

STERISEPT WIPES jsou jednorázové ubrousky v praktickém balení a připravené k použití. Neobsahují alkohol, aldehydy, fenoly a BHMB. Obsahují tenzidy. Materiálová kompatibilita s povrchy a pomůckami z nerezové oceli, skla, hliníku, mědi, mosazi, keramiky, PVC, gumy, plastů, silikonu, akrylu a plexiskla.

OBLAST POUŽITÍ:

- rychlá dezinfekce bez obsahu alkoholu a šetrná k materiálům citlivých na alkohol
- všechna zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, domovy pro seniory, farmaceutický a kosmetický průmysl
- inkubátory, displeje, klávesnice a ovládací panely a vany
- vhodný na povrchy v okolí pacienta

POUŽITÍ:

Ubrousky jsou připraveny k použití. Vytáhněte ubrousek z plastické dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu.

Nechte exponovat. Používejte pouze na viditelně čisté a suché povrchy. Po odtržení ubrousku zavřete okamžitě kryt, aby nedošlo k vysušení ubrousků. Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte na pokyny výrobce. Vhodný na citlivé materiály (plexisklo, akrylát, lesklé plasty).

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní (Clostridium diff.)

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	1 min
Levurocidní	EN13624, EN14562, EN13697	1 min
Baktericidní a levurocidní	EN16615	1 min
Mykobaktericidní	EN14348	5 min
Obalené viry	EN14476	30 s
Norovirus	EN14476	30 s
Rotavirus	EN14476	30 s
Fungicidní (Aspergillus brasiliensis)	EN13624	10 min
Sporicidní (Clostridium difficile)	EN13704	15 min

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Didecylmethylammonium chlorid (DDAC) 0,45 g; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin 0,45 g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek třídy IIb

BALENÍ:

Kód	Balení
097	100 ks dóza (16x20cm)
098	120 ks dóza (20x20cm)
099	200 ks dóza (20x20cm)



100 ks / 120 ks / 200 ks



CP DRY WIPES DISPENSER SYSTEM

Netkané jednorázové ubrousky do systému opakovaně použitelných kbelíků pro rychlou a snadnou dezinfekci ploch a povrchů

CP DRY WIPES DISPENSER SYSTEM je určen pro rychlou a snadnou dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků jednorázovými ubrousky z uzavřeného systému. Ubrousky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní absorpční polyesterové tkaniny a speciálně navrženého zásobníku s víkem k opakovatelnému použití. Lze použít společně s připraveným koncentrátem BACTICID AF, STERISEPT RTU nebo s pracovním roztokem naředěným z koncentrovaného prostředku STERISEPT PLUS. Je to perfektní řešení pro každodenní dezinfekci a čištění povrchů ve zdravotnických zařízeních.



OBLAST POUŽITÍ:

- k rychlé dezinfekci v uzavřeném systému s jednorázovými ubrousky
- všechna zdravotnická zařízení, laboratoře, ústavy sociální péče domovy pro seniory, farmaceutický průmysl
- všechny dezinfekční prostředky Chemi-Pharm jsou kompatibilní s ubrousky Dry Wipes.
- jednorázové utěrky v uzavřeném systému jsou použitelné po dobu 28 dnů (včetně)

KOMPATIBILITA S PŘÍPRAVKY:

BACTICID AF – použít koncentrát

STERISEPT RTU – použít koncentrát

STERISEPT PLUS – použití od 0,5% koncentrace

BALENÍ:

Kód	Balení
094	1 role / 100 ks ubrousků (30x32cm)



100

CE
0537

STERISEPT PLUS

Koncentrovaný tekutý dezinfekční a prostředek na plochy a povrchy zdravotnických prostředků

STERISEPT PLUS je tekutý koncentrovaný dezinfekční prostředek s obsahem tenzidů pro manuální čištění na plochy a povrchy zdravotnických prostředků. Bez obsahu fenolů, aldehydů a fosfátů se širokým spektrem účinnosti.

OBLAST POUŽITÍ:

- vhodný pro použití v nemocnicích, farmaceutickém průmyslu, veterinárních oblastech, laboratořích, zubních klinikách a v jiných zdravotnických zařízeních
- vhodný na povrchy a plochy zdravotnických prostředků otěrem
- materiálová kompatibility s běžnými materiály (nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty)
- nevhodný na povrchy z mosazi, mědi, hliníku, pryže a na poniklované nebo pochromované materiály
- nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.



POUŽITÍ:

Připravte pracovní roztok zředěním požadované koncentrace ve vodě o teplotě 20 °C–25 °C. Roztok se aplikuje otřením. Dbejte na důkladné smočení povrchu zdravotnického prostředku. Nepoužívejte společně s přípravky na bázi aldehydů. DISPENSER SYSTEM pro pohodlnou a uživatelsky příjemnou aplikaci. Jednorázové utěrky v uzavřeném systému jsou použitelné po dobu 28 dnů.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	METODA TESTOVÁNÍ	DOBA PŮSOBNÍ / KONCENTRACE		
		5 MIN	15 MIN	30 MIN
Baktericidní (vč. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561		0,25%	
Levurocidní	EN13624		0,25%	
Baktericidní a levurocidní	EN13697		0,25%	
Mykobaktericidní	EN14348		0,5%	
Obalené viry	EN14476	0,5%	0,25%	
Rotavirus	EN14476	0,5%		

SLOŽENÍ:

100 g produktu obsahuje aktivní složku: Didecyldimethylammonium chlorid (DDAC) 12,5 g; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin 12,5g.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek třídy IIa

BALENÍ:

Kód	Balení
090	1 l dávkovací láhev
091	5 l kanistr



1000 ml / 5000 ml

CHLORINEX 60

Tabletovaný dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru pro dezinfekci všech ploch a povrchů odolných působení chloru

CHLORINEX-60 jsou ve vodě rozpustné vysoce účinné dezinfekční tablety, které obsahují aktivní chlor. Vhodný dezinfekční prostředek na všechny omyvatelné povrchy. Výhodou je snadné a účinné dávkování za přítomnosti vysoké organické zátěže. Přípravek může mít bělící účinky.

OBLAST POUŽITÍ:

- vhodné pro dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů ve všech oblastech zdravotnictví, komunální hygieny, pečovatelských domech, veterinárních klinikách, centrech denní péče, saunách, toaletách, sanitárních místnostech, v institucích i potravinářství
- snadné a účinné dávkování v tabletách
- kompatibilita s materiály, např. plasty (PE, PP, PVC), nerezová ocel, keramika, sklo, smalt, pryž, latex, plexisklo apod.
- nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména z kovu

POUŽITÍ:

Dezinfekční roztok připravíte vložením příslušného počtu tablet do vody o teplotě 20–25 °C. Po rozpuštění tablet (cca do 10 minut) roztok důkladně promíchejte. Předem odstraňte z ploch a předmětů viditelné znečištění. Roztok se aplikuje pomocí otěru. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Po předepsanou dobu expozice musí zůstat plochy a předměty smočené roztokem. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s potravinami důkladně po dezinfekci opláchněte pitnou vodou. V případě dezinfekce výlevků a odpadních sítí vložíme tabletu do sifonu a necháme pozvolna rozpouštět.

ÚČINNOST:

baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, levurocidní, sporicidní

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST:

ÚČINNOST	NORMA	KONCENTRACE	EXPOZICE
Baktericidní	EN 13727+A2	1 tbl / 1,5 l vody	15 min
Baktericidní	EN 13697	1 tbl / 1,5 l vody	15 min
Levurocidní (C.albicans)	EN 13624	1 tbl / 1,5 l vody	15 min
Levurocidní (C.albicans)	EN 13697	1 tbl / 1,5 l vody	15 min
Fungicidní (A. brasiliensis)	EN 13697	1 tbl / 1,5 l vody	15 min
Mykobaktericidní (M.terrae, M.avium)	EN 14348	1 tbl / 1,5 l vody	15 min
Virucidní (adenovirus)	EN 14476	1 tbl / 1,5 l vody	5 min
Virucidní (adenovirus)	EN 14476	2 tbl / 1,5 l vody	15 min
Virucidní (poliovirus)	EN 14476	1 tbl / 1,5 l vody	5 min
Virucidní (poliovirus)	EN 14476	2 tbl / 1,5 l vody	15 min
Sporicidní (clostridium diff.)	EN 13704	6 tbl / 1,5l vody	15 min
Sporicidní (clostridium diff., bacillus subt.)	EN 13704	10 tbl / 1,5l vody	15 min

SLOŽENÍ:

Hmotnost jedné tablety je 3,3 g a každá tableta obsahuje 1,5 g aktivního chloru.

TYP PŘÍPRAVKU:

Biocid


BALENÍ:

Kód	Balení
110	1 kg dóza (cca 300ks tablet)



300 tablet



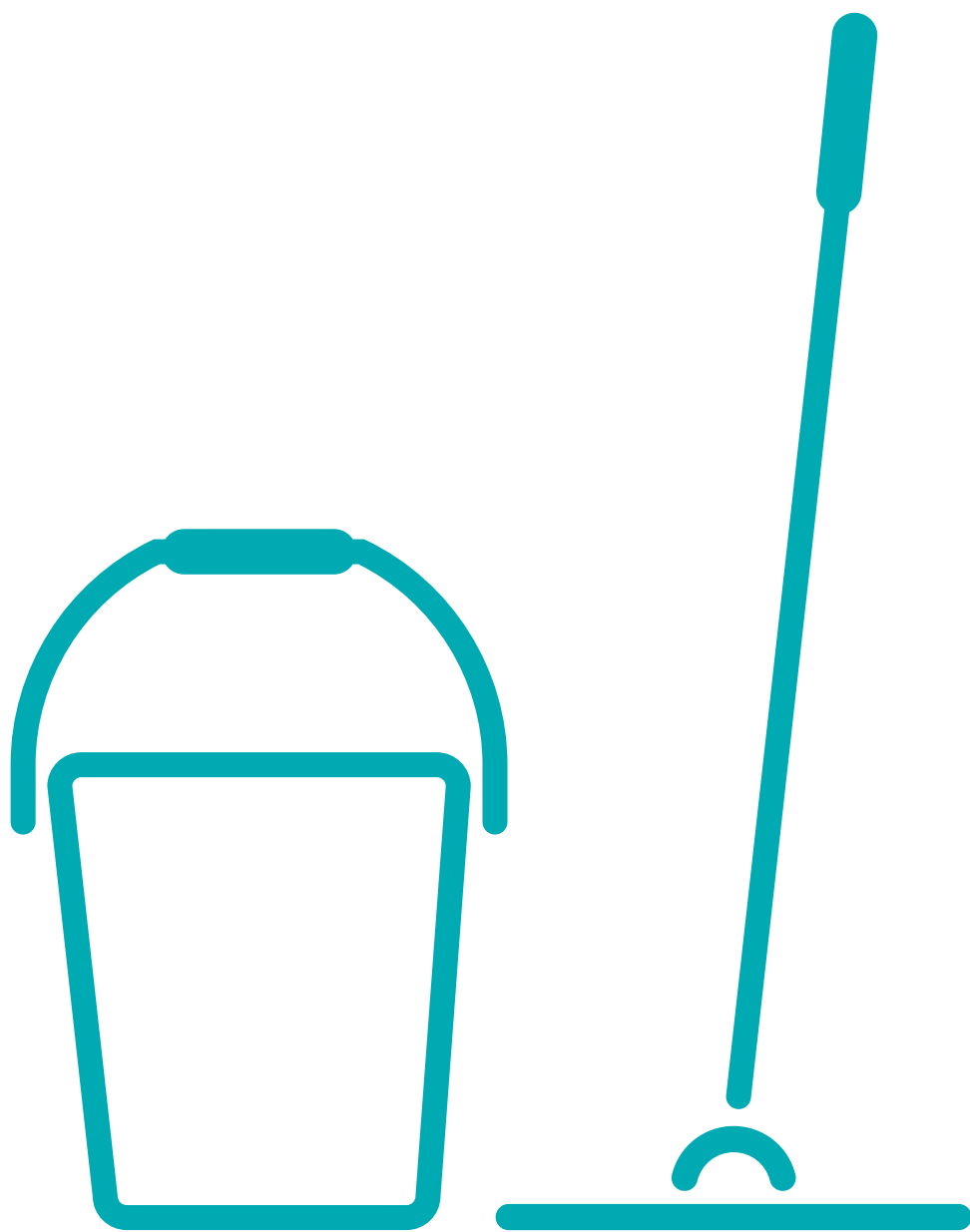

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA PLOCHY A POVRCHY

CHEMIPHARM DES NEW

Tekutý prostředek s dezinfekčním účinkem na plochy a povrchy

CHEMIPHARM DES NEW je tekutý mycí a čistící prostředek s dezinfekčním účinkem pro všechny voděodolné plochy a povrchy. Používá se pro každodenní čištění a mytí ploch a povrchů.

CHEMIPHARM DES NEW kombinuje účinné čištění s dezinfekčním účinkem s vynikajícími mycími schopnostmi. Je zvláště vhodný pro preventivní dezinfekci velkých ploch v běžně používané oblasti.

OBLAST POUŽITÍ:

- vhodný pro mytí a čištění podlah ve všech zdravotnických zařízeních, institucích, domovech ústavní péče, zemědělství, potravinářství, veterinární oblasti
- průmyslu, kadeřnických a kosmetických salonech, saunách, plaveckých bazénech a všude tam, kde je třeba čištění společně s dezinfekcí

POUŽITÍ: Aplikujte na plochy a povrchy v požadované koncentraci (dle znečištění) v teplé vodě.

Plochy a povrchy otřete pomocí textilie smočené v pracovním roztoku.

SLOŽENÍ: 100 g produktu obsahuje aktivní složku: Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chlorid 3,5 g; Alkyl (C12-C14) ethylbenzyl ammonium chlorid 3,5 g.

TYP PŘÍPRAVKU: čistící přípravek

BALENÍ:

Kód	Balení
102	1 l láhev s uzávěrem
103	5 l kanystř



1000 ml / 5000 ml



CLEAN FEEL

Tekutý univerzální čistící prostředek pro ruční mytí ploch a povrchů

CLEAN FEEL je účinný univerzální čistící prostředek vhodný pro všechny voděodolné povrchy pro každodenní čištění ploch a povrchů. Lze použít i pro čištění textilií, potlačuje zápach.

OBLAST POUŽITÍ:

- vhodný pro mytí podlah stěn a ostatních ploch v obecné a komunální hygieně, institucích, zemědělství, potravinářství, veterinární oblasti, zdravotnictví atp.
- vhodný k čištění všech ploch a povrchů i textilií
- kompatibilita s běžnými používanými materiály (linolea, lakované povrchy, glazury)
- účinně odstraňuje nečistoty, ale také mastnotu a zaschlou špínu

POUŽITÍ: Aplikovat na plochy a povrchy v požadované koncentraci (dle znečištění) v teplé vodě. Plochy a povrchy otřete pomocí textilie smočené v pracovním roztoku.

SLOŽENÍ: sulfonové kyseliny, alkanhydroxy, sodné soli, uhličitán sodný

TYP PŘÍPRAVKU: čistící přípravek

BALENÍ:

Kód	Balení
113	1 l láhev s uzávěrem
114	5 l kanystř



1000 ml / 5000 ml



NEUTRAL CLEANER

Tekutý univerzální čisticí prostředek pro ruční mytí leštěných ploch a povrchů

NEUTRAL CLEANER se používá k čištění všech voděodolných ploch a povrchů. Hodnota pH produktu je neutrální, je vhodný pro čištění leštěných podlah, stejně jako pro každodenní péči o lakované, PVC a linoleové povrchy a podlahy. Potlačuje zápach.

OBLAST POUŽITÍ:

- vhodný pro mytí podlah, stěn a ostatních ploch v obecné a komunální hygieně, institucích, potravinářství, veterinární oblasti, zdravotnictví atp.
- vhodný k čištění leštěných ploch a povrchů
- kompatibilita s běžnými používanými materiály (leštěné a lakované plochy, PVC, linolea, glazury)
- účinně odstraňuje nečistoty, ale také mastnotu a zaschlou špínu

POUŽITÍ: Aplikovat na plochy a povrchy v požadované koncentraci (dle znečištění) v teplé vodě. Plochy a povrchy otřete pomocí textilie smočené v pracovním roztoku.

SLOŽENÍ: alkoholy, etoxylované, sulfonové kyseliny, sodné soli

TYP PŘÍPRAVKU: čisticí přípravek

BALENÍ:

Kód	Balení
102	1 l láhev
103	5 l kanystř



1000 ml / 5000 ml



BOZO

Tekutý čisticí prostředek na sanitární povrchy a plochy

BOZO je tekutý čisticí prostředek na sanitární povrchy. Efektivně odstraňuje nečistoty, rez, vodní kámen a potlačuje zápach.

OBLAST POUŽITÍ:

- vhodný pro mytí podlah stěn a ostatních ploch v obecné a komunální hygieně (např. sanitární plochy, WC, umyvadla, vany, obklady včetně spár, dřezy), v institucích, potravinářství, veterinární oblasti, zdravotnictví atp.
- kompatibilita s běžnými používanými materiály (porcelán, smaltované povrchy, povrchy z nerezové oceli, mědi, mosazi a bronzu)
- účinně odstraňuje vodní kámen

POUŽITÍ:

Aplikovat na plochy a povrchy v požadované koncentraci (dle znečištění) v teplé vodě. Plochy a povrchy otřete pomocí houbičky nebo textilie smočené v pracovním roztoku. Při velkém znečištění (především WC) použít koncentrát, nechat exponovat a opláchnout.

SLOŽENÍ: kyselina fosforečná

TYP PŘÍPRAVKU: čisticí přípravek


BALENÍ:

Kód	Balení
115	1 l láhev s uzávěrem
116	5 l kanystř




1000 ml / 5000 ml



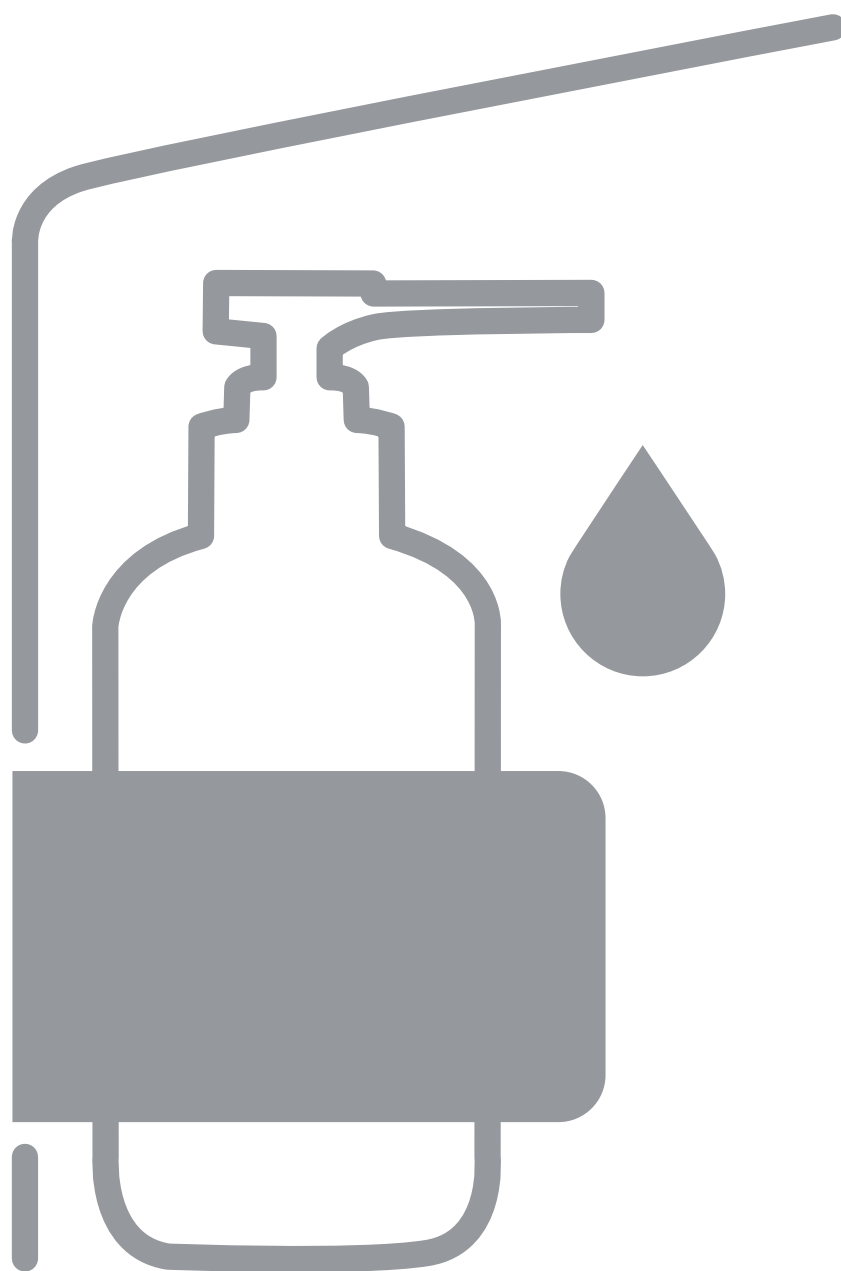

DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ A POMŮCKY

DÁVKOVAČE NA STĚNU S PÁKOU NEBO BEZ PÁKY

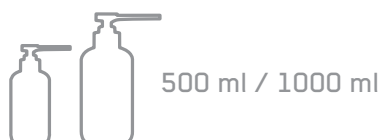

DÁVKOVAČE NA POSTEL



DÁVKOVAČE NA STĚNU PRO LAHVE TYPU AIRLESS LAHVE



1000 ml



DÁVKOVAČE NA STĚNU S LIŠTOU, S PÁKOU NEBO BEZ PÁKY



500 ml / 1000 ml



NORMY

DEZINFEKCE RUKOU A HYGIENICKÉ MYTÍ RUKOU

EN 1499 - hygienické mytí rukou

EN 1500 - hygienická dezinfekce rukou

EN 12791 - chirurgická dezinfekce rukou

ÚČINNOST PROTI VIRŮM

EN 14476

ÚČINNOST PROTI BAKTERIÍM

EN 1040

EN 1276

EN 13727 (vč. MRSA, VRE)

EN 14561

ÚČINNOST PROTI KVASINKÁM, HOUBÁM

EN 1275

EN 1650

EN 13624

EN 14562

ÚČINNOST PROTI TUBERKULÓZE, MYKOBAKTERIÍM

EN 14348

EN 14563

ÚČINNOST PROTI BAKTERIÍM, KVASINKÁM, HOUBÁM

EN 13697

ÚČINNOST PROTI SPORÁM

EN 13704

DEZINFEKČNÍ UBROUSKY ÚČINNOST PROTI BAKTERIÍM, KVASINKÁM

EN 16615

