

TOP PRODUKTY



ANIOSGEL 85 NPC

Unikátní gel k dezinfekci rukou, který se při roztírání mění na kapalinu

ANIOSYME XL3

Přípravek k dekontaminaci instrumentaria s výjimečnými čistícími schopnostmi



SURFANIOS PREMIUM

Ekonomický přípravek k dezinfekci podlah a povrchů

SURFA'SAFE PREMIUM

Pěnový přípravek s patentovanou formulací bez škodlivých CMR látek



PŘEHLED

NEJČASTĚJŠÍHO ZPŮSOBU POUŽITÍ PRODUKTŮ ANIOS

		ZPŮSOB APLIKACE	NÁZEV PRODUKTU	ÚČINNÁ LÁTKA	KONCENTRACE	EXPOZICE	SPÉKTRUM ÚČINNOSTI	VÝHODA
PLOCHY A POVRCHY	VELKÉ	Pracovním roztokem navlhčit plochy a nechat zaschnout	SURFANIOS PREMIUM	KAS, amfoterní lát.	0,25% 0,25%	15min 60min	ABJ ABJTV	Roztok stabilní 7 dní
			ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroctová	0,5% 0,5%	15min 60min	ABJTMV ABJTMV	Účinný proti Cl. Difficile, prášková formulace
	MALÉ	Aplikovat postřikem, rovnoměrně rozstříkat, nechat zaschnout	SURFA'SAFE PREMIUM	amfoterní lát.	k použití	3min 20min	ABJ ABJTV	Na otvřené materiály, nept. na inkubátory, kompaktní pánva
			ANIOSPRAY QUICK	alkohol, KAS	k použití	5min	ABJTMV	Účinný proti svrabu a Adenoviru
	AEROSOLOVÁ DEZINFEKCE	Ořít ubrouskem, nechat zaschnout	WIPANIOS PREMIUM	biguanidin, amfoterní lát.	k použití	2min 20min	ABJ ABJTV	Rozměr ubrousku 18x20 cm, bez CMR látek
			ANIOS QUICK WIPES	alkohol, KAS	k použití	5min	ABJTMV	Příjemná vůně
NÁSTROJE	DEKON- TAMINACE	Aplikovat za pomoci přístroje Aerosept Compact 250	ASEPTANIOS AD	kyselina peroctová	k použití	120min	ABCV	Dezinfekuje i nepřístupná místa
			ANIOSYME XL3	KAS, enzymy	0,5% 0,5%	5min 60min	ABJ ABJTV	Extra účinně čistí
			ANIOSEPT ACTIV	kyselina peroctová	0,5% 2%	5min 15min	A ABTV	Dekontaminace i vyšší stupeň dezinfekce
	VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE	Po předchozí dekontaminaci ponořit do roztoku, exponovat, opláchnout sterilní vodou	ANIOSYME SYNERGY 5	enzymy	0,3%			Pro ruční čištění i čištění v myčkách
			ANIOSEPT ACTIV	kyselina peroctová	2%	15min	ABCTMV	Roztok stabilní 24 h
			STERANIOS 2%	aldehyd	k použití	30min	ABCTMV	Roztok stabilní 30 dní
RUCE A TĚLO	MYTÍ	Umýt ruce či tělo, opláchnout, osušit	DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDINE 4%	chlorhexidin	HMR-3 ml CHMR-2x3ml Tělo-30ml	30s 5min	A	Hygienické i chirurgické mytí rukou. Účinný proti BVDV, PRV, Herpes, Rotavirus.
			DERMANIOS SCRUB CG	chlorhexidin	3 ml	30s	A	Účinný proti BVDV, Herpes, RSV
			ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF		3 ml			K mytí novorozenců
	DEZINFEKCE	Vlíst na umyté, suché ruce (popř. předloktí) po předepsanou dobu, do zaschnutí	ANIOSGEL 85 NPC	alkohol	HDR-3ml CHDR-2x3ml	30s 2x45s	ABTMV	Tixotropní gel-př. vlístí se mění v kapalinu, neteplí, obsahuje pouze ethanol
			ANIOSRUB 85 NPC	alkohol	HDR-3ml CHDR-2x3ml	30s 2x45s	ABTMV	Kapalná formulace, obsahuje pouze ethanol

VYSVĚTLIVKY:

A – baktericidní účinnost
(B) – omezená virucidní účinnost
B – virucidní účinnost
C – sporocidní účinnost

T – tuberkulocidní účinnost
M – mykobaktericidní účinnost
V – fungicidní účinnost



KOMPLEXNÍ DEZINFEKČNÍ PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ



VEVÝHRADNÍM ZASTOUPENÍ PRO ČR

MAPO medical s.r.o.
Olomoucká 3896/114
796 01 Prostějov
Czech Republic
+420 543 331 042
www.mapomedical.cz



MAPO medical

PLOCHY A POVRCHY



PODLAHY
A POVRCHY



SURFANIOS PREMIUM

Přípravek k dezinfekci a čištění podlah a povrchů. Parfémován jemnou citrusovou vůní. Bez aldehydu. Účinný již od 0,25% koncentrace.

ÚČINNÉ LÁTKY: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, didecylmethylammonium chloride

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní (BVDV/Vaccinia/HIV-1/ PRV/Herpesvirus/Coronavirus), tuberkulocidní, fungicidní

Typ přípravku: Biocid

Balení: 1 l, 5 l

ANIOS OXY FLOOR

Práškový přípravek k dezinfekci a čištění podlah a povrchů. Zvláště vhodný k použití v období epidemií. Alternativa chlorovým přípravkům. Vysoce účinný proti Clostridium difficile, Noroviru, Rotaviru...

ÚČINNÉ LÁTKY: Prášek obsahuje sodium percarbonate, tetraacetylenediamine a N-alkyl(C12-C14)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride. Kyselina peroctová vzniká rozpouštěním prášku ve vodě (ve 100 g 0,5% roztoku cca 750 ppm)

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, účinný proti Cl.Difficile

Typ přípravku: Biocid

Balení: 1 kg



DEZINFEKCE
POSTŘÍKEM



SURFA SAFE PREMIUM

Pěnový přípravek k dezinfekci a čištění ploch a povrchů. Aplikace postříkem. Patentovaná formulace bez alkoholu, parfému a CMR látek. Výborná materiálová snášenlivost, vhodný i pro inkubátory. Nedráždí dýchací cesty. Nezanedává žádné stopy na površích. Vhodný i pro povrchy přicházející do kontaktu s potravinami.

ÚČINNÉ LÁTKY: Didecylmethylammonium chloride

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní (BVDV/Vaccinia/Norovirus/Rotavirus), fungicidní

Typ přípravku: Biocid (tř. 2 a 4) a zdravotnický prostředek

Balení: 750 ml

ANIOSPRAY QUICK

Alkoholový postřikový přípravek k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Rychlá mikrobiální účinnost již od 30s. Příjemně voní. Nezanedává žádné stopy na površích.

ÚČINNÉ LÁTKY: Ethanol, KAS

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní (Adenovirus/BVDV/Vaccinia/Coronavirus/ Herpesvirus/Rotavirus/Influenza virus A [H1N1]/Calicivirus Feline), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, účinný proti Tricophyton mentagrophytes (svrab)

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 1l, 5l



DEZINFEKCE
UBROUSKY



WIP ANIOS PREMIUM

Ubrusky k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Bez alkoholu, CMR látek, parfému a barviv. Rozměr ubrousku 18x20 cm. Ubrusek z 100% odbouratelné viskózy.

ÚČINNÉ LÁTKY: Impreganční látka: didecylmethylammonium chloride, chlorhydrate polyhexamethylene biguanide chlorhydrate, kationtové a amfoterní povrchově aktivní látky

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní (BVDV/Vaccinia), tuberkulocidní, fungicidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 100 ks

ANIOS QUICK WIPES

Ubrusky na bázi alkoholu k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Rychlá antimikrobiální účinnost od 30s.

ÚČINNÉ LÁTKY: Ethanol, KAS

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní (BVDV/Vaccinia/Adenovirus/Coronavirus/ Herpesvirus/Rotavirus/Influenza virus A [H1N1]/Calicivirus Felin), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 120 ks



AEROSOLOVÁ
DEZINFEKCE



ASEPTANIOS AD + AEROSEPT COMPACT 250

Přípravek k aerosolové dezinfekci. Doplnková vysoce účinná dezinfekce i špatně přístupných povrchů mnoha typů. Aplikace pomocí přístroje Arosept Compact 250. Plně automatický, jednoduše nastavitelný proces. Vhodný především pro operační sály, dialyzační centra, jednotky intenzivní péče, infekční oddělení, apod.

ÚČINNÉ LÁTKY: Stabilizovaný roztok kyseliny peroctové a peroxidu vodíku

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní, fungicidní, sporocidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 2l

NÁSTROJE



ENZYMATICKÉ
ČIŠTĚNÍ



ANIOSYME SYNERGY 5

Unikátní přípravek k enzymatickému čištění instrumentaria. 5 druhů enzymů v 1 přípravku. Čistí a odmašťuje. Odstraňuje všechny druhy znečištění. Vhodný k ručnímu čištění i čištění v myčkách. Bezpečný pro životní prostředí.

ÚČINNÉ LÁTKY: Enzymatický komplex (amyláza, celulóza, lipáza, mannáza, a proteáza), neionogenní a aniontové látky

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 1l, 5l

ANIOSYME XL3

Přípravek k vysoce účinnému čištění a dekontaminaci instrumentaria, včetně endoskopického vybavení. Patentovaná formulace. Obsahuje 3 druhy enzymů. Bez korozivních účinků. Vhodný pro sběr znečištěného instrumentaria, manuální čištění, čištění v ultrazvukových čističkách.

ÚČINNÉ LÁTKY: Quaternary ammonium carbonate, enzymatický komplex (proteázy, amylázy a mannanázy), neionogenní povrchově aktivní látky

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní (BVDV/Vaccinia), tuberkulocidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 1l, 5l

ANIOSEPT ACTIV

Přípravek k dekontaminaci instrumentaria a vyššímu stupni dezinfekce (2 v 1). Prášková formulace. Široká antimikrobiální účinnost v 15 min. Kontrola roztoku testovacími proužky.

ÚČINNÉ LÁTKY: Sodium percarbonate, tetraacetyl-ethylenediamine, N-alkyl (C12-14)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride. Při rozpouštění přípravku ve vodě se tvoří peroctová kyselina

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 1kg, 5kg



VYŠŠÍ STUPĚŇ
DEZINFEKCE



STERANIOS 2%

Přípravek k vyššímu stupni dezinfekce. Na bázi aldehydu. Připraven k okamžitému použití bez nutnosti ředění. Stabilita roztoku až 30 dní. Kontrola roztoku testovacími proužky. Kompatibilita se všemi druhy materiálů.

ÚČINNÉ LÁTKY: Glutaraldehyd

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 5l

STERANIOS 20%

Přípravek k vyššímu stupni dezinfekce. Potřeba rozředit. Stejně vlastnosti jako u přípravku Steranios 2%.

ÚČINNÉ LÁTKY: Glutaraldehyd

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 500ml, 5l

ANIOXYDE 1000

Přípravek k vyššímu stupni dezinfekce. Dvousložkový přípravek. K použití po aktivaci. Plná antimikrobiální účinnost v 5min. Nefixuje proteiny. Roztok stabilní 14 dní. Kontrola roztoku testovacími proužky.

ÚČINNÉ LÁTKY: Tvorba peroctové kyseliny z acetylcaprolaktamu (PHERA® systém), Anioxyde 1000 – Báze obsahuje 3% peroxidu vodíku

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek

Balení: 5l báze + aktivátor

TESTOVACÍ PROUŽKY

Testovací proužky ANIOSEPT ACTIV

Testovací proužky STERANIOS 2%

Testovací proužky ANIOXYDE 1000



MYTÍ RUKOU
A TĚLA



DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDENE 4%

Antiseptické mýdlo k hygienickému i chirurgickému mytí rukou a mytí celého těla. Velmi šetrné k pokožce, pH 5,5.

ÚČINNÉ LÁTKY: Chlorhexidine digluconate (4%)

Spektrum účinnosti: Baktericidní, účinný proti virům (PRV/BVDV/Herpesvirus/Rotavirus), účinný proti mikroskopickým kvasinkám

Typ přípravku: Biocid

Balení: 500ml a 1l (s pumpičkou), 5l



DERMANIOS SCRUB CG

Antiseptické mýdlo k hygienickému mytí rukou a celého těla.

ÚČINNÉ LÁTKY: Chlorhexidine digluconate (1,6%)

Spektrum účinnosti: Baktericidní, účinný proti virům (BVDV/Herpesvirus/RSV), účinný proti mikroskopickým kvasinkám

Typ přípravku: Biocid

Balení: 500ml a 1l (s pumpičkou), 5l



ANIOSAFE MANUCLEAR HF NPC

Mýdlo pro hygienu rukou a těla. Bez detergentů a alergenů. Rezistentní proti mikrobiálnímu znečištění z vnějšího prostředí. Vhodné k častému mytí, mytí citlivé pokožky i k mytí novorozenců.

Typ přípravku: Kosmetický přípravek

Balení: 500ml a 1l (s pumpičkou), 5l



DEZINFEKCE
RUKOU



ANIOSGEL 85 NPC

Gelový přípravek k dezinfekci rukou. Tixotropní gel, který se při roztírání mění v kapalinu. Nelepí. Je hypoalergenní. Testy dle EN na širokém spektru mikroorganismů.

ÚČINNÉ LÁTKY: Ethanol

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, fungicidní

Typ přípravku: Biocid

Balení: 500ml a 1l (s pumpičkou), 500ml (pro dávkovač), 5l



ANIOSRUB 85 NPC

Tekutý přípravek k dezinfekci rukou. Bez barviv a parfému. Široká antibakteriální účinnost.

ÚČINNÉ LÁTKY: Ethanol

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, fungicidní

Typ přípravku: Biocid

Balení: 500ml a 1l (s pumpičkou), 5l



DÁVKOVAČE

DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ NA LÁHEV 500 ml

DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ NA LÁHEV 1 l

DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ – PÁKOVÝ NA LÁHEV 500 ml

DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ – PÁKOVÝ NA LÁHEV 1 l

